

ISTRUZIONI PER IL PRELIEVO E L'INVIO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

PRELIEVO DI SANGUE VENOSO IN PROVETTA DI PLASTICA

1. Prelevare 0,5 - 1 ml di sangue venoso, raccogliendolo in una provetta da ematologia, come quella indicata nella figura, contenente come anticoagulante K₃-EDTA
Non utilizzare provette di vetro




2. Indicare sulla provetta l'identificativo univoco dell'individuo (N° chip, LOI, nome)

PRELIEVO CON VET CARD

1. Effettuare una piccola puntura sull'interno del labbro del cane o sull'orecchio con l'apposita lancetta monouso
2. Depositare la goccia di sangue sulla parte cerchiata in nero, come mostrato in figura. Il prelievo di sangue deve essere almeno della dimensione di circa 1 cm di diametro

Lasciare asciugare per circa 30 minuti prima di chiudere la bustina che contiene la Vet Card

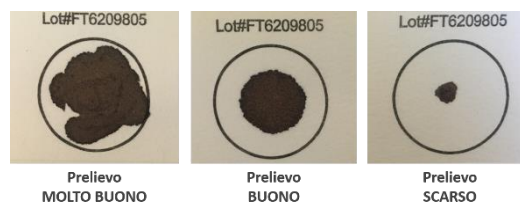

3. Indicare sulla Vet Card l'identificativo univoco dell'individuo (N° chip, LOI, nome)

Inviare per posta prioritaria o per corriere il campione biologico ed il modulo di richiesta analisi compilato in ogni sua parte al laboratorio:

NGB Genetics srl - Via Ruggero Grieco 5/1A 40133 Bologna (BO)

Per informazioni telefonare al numero 051.6153024 dal lunedì al venerdì
oppure inviare una e-mail ad analisi@ngbgenetics.com